

R2289  
**RALA**  
DES2



Wirksamkeit  
geprüft und  
bestätigt durch  
ÖGHMP

geeignet für  
rückstandsfrei  
aldehydfrei  
parfümfrei  
Bestandteile  
Kleinfächer

# SCHNELL- DESINFEKTION

Gebrauchsfertige, alkoholhaltige Schnelldesinfektion mit hohem Reinigungseffekt, für alle alkoholbeständigen Oberflächen. Besonders für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie und im Küchenbereich geeignet. Zur wirksamen Schnelldesinfektion von medizinischem Inventar und nichtinvasiven Medizinprodukten. **Wirksamkeit:**

**Einwirkzeit: 30 sec.**

Wirksam gegen alle behüllten Viren wie Vakzina, BVDV, HBC, HIV, HCV, Influenza/Viren, Tuberkulose-Bakterien (M. terrae).

**Einwirkzeit: 1 min.**

Bakterizid inkl. MRSA, fungizid (C. albicans) / levurozid gem. DGHM/ÖGHMP/VAH-Richtlinien/EN 13697. Wirksam gegen Murines Noro-Virus

**Anwendung:** Oberflächen vollständig benetzen und über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten. Nach Ablauf der Einwirkzeit bei Bedarf mit Einmaltuch nachwischen. Nicht geeignet für Acrylglas (PMMA). **Hinweise:** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Bei KONTAKT MIT DEN AUGEN einige Minuten behutsam mit Wasser spülen, eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen, weiter spülen, ggf. Arzt aufsuchen. Behälter dicht geschlossen halten! Von Zündquellen fernhalten! Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Max. 50 mL/m<sup>2</sup> aufbringen. Die Gesamtmenge pro Raum darf nicht mehr als 100 mL/m<sup>2</sup> Raumgrundfläche betragen. Biozid sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Von Hitze/Funken/offener Flamme fernhalten. Entsorgung gemäß örtl. Vorschriften. **Biozide Wirkstoffe:** 100g enthalten Ethanol 45,0g. Restentleerte Gebinde an Kunststoffsammlungstelle geben. **Achtung**

**Verwendbar bis:** Siehe Aufdruck Packung.

**pH-Wert: 7,0**



e750ml

Entwickelt und hergestellt in Vorarlberg (A)  
**Service & Bestellhotline (+43(0)5524-8353**

Rala Hygiene GesmbH | Eicheng 22 | A-6824 Schllins  
Tel: 05524-8353-0 | info@rala.at | www.rala.at